


# Gebrauchsanleitung der Crono APO-go® PUMPEN

Die folgenden Produkte werden benötigt:






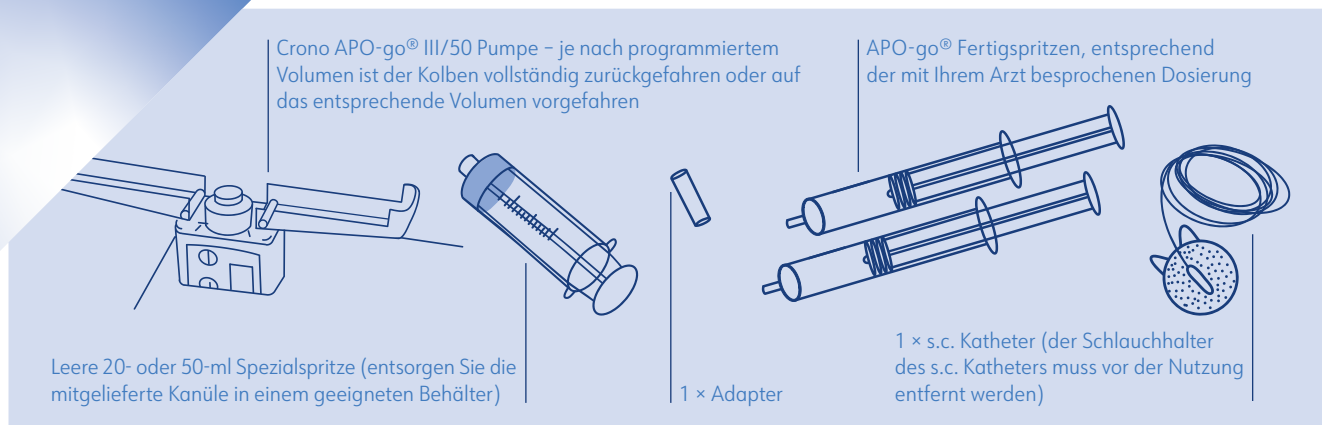



## Vorbereiten der Infusion

Die folgende Abbildung ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung einer komplett befüllten 20-ml-Pumpe.

Bei Abweichungen der Dosierung sprechen Sie unsere Servicemitarbeiter/innen an.

Vor der Vorbereitung müssen die Hände desinfiziert und die Batterieanzeige geprüft werden.

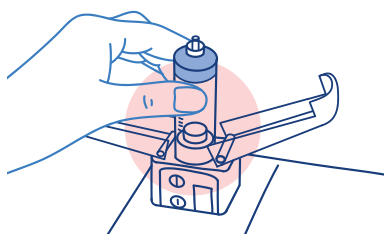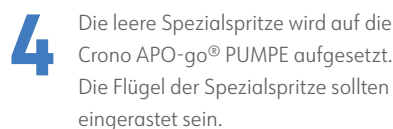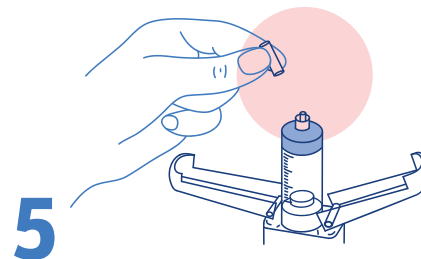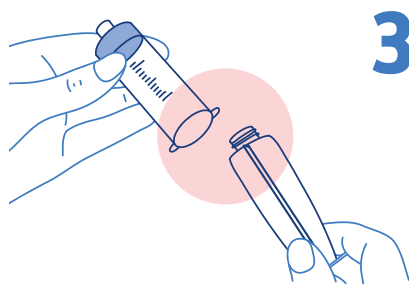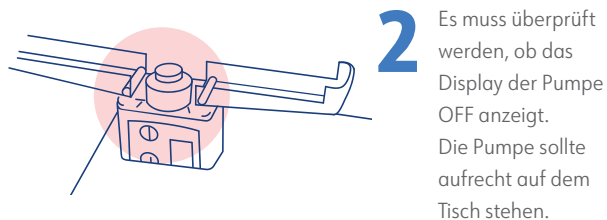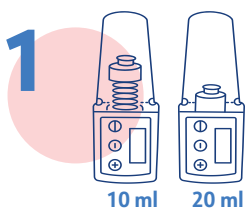


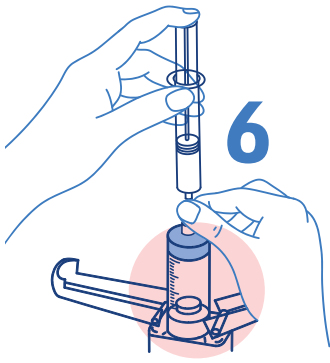


Die APO-go® Fertigspritze wird nun auf den Adapter gesetzt und die Flüssigkeit langsam in die leere Spezialspritze gedrückt. Je nach Dosierung ist eine weitere Fertigspritze nötig. Es kann ein Rest Flüssigkeit in der Spritze verbleiben.

Nun wird die Injektionsstelle ausgewählt und mit einem Hautdesinfektionsmittel desinfiziert. Die desinfizierte Stelle muss 30 Sekunden trocknen. Die Schutzfolie vom Pflaster des s.c. Katheters abziehen und die Schutzkappe an der Nadel abdrehen.


**Achtung:** Die Nadel darf nicht berührt werden.

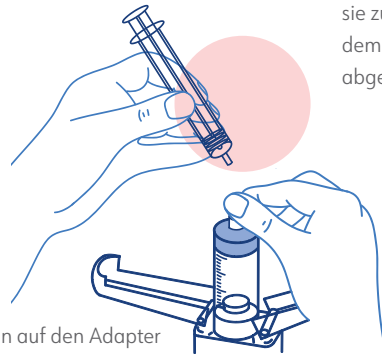

**7** Die leere APO-go® Fertigspritze wird entfernt, indem sie zusammen mit dem Adapter abgedreht wird.

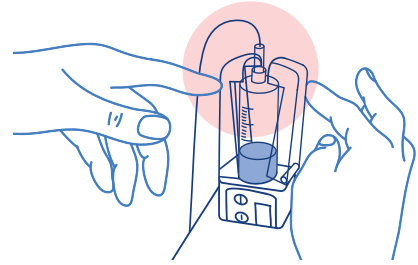

**8** Nun wird die Schlauchhalterung des Katheters entfernt und er wird vorsichtig lang gezogen, um alle Schlaufen zu glätten. Anschließend wird der s.c. Katheter fest auf die Spezialspritze geschraubt und die Flügel der Pumpe geschlossen.

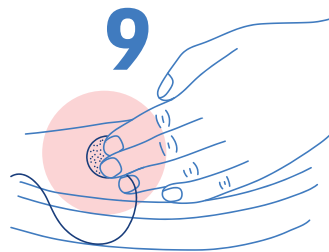

Die desinfizierte Stelle wird locker mit 2 Fingern zusammengehalten. Den s.c. Katheter an der Griffplatte festhalten und die Katheternadel in einem Winkel von 90° einstechen. Dann die Klebefläche des Katheters fest an die Haut drücken. Vor dem Fixieren 1–2 Entlastungsschlaufen in den Katheterschlauch legen und dann mittels eines Pflastersteifens festkleben.

## Beenden der APO-go® Infusion

CAVE: Bitte zuerst immer die Pumpe abschalten und den s.c. Katheter entfernen, bevor der Kolben in Startposition gebracht wird.

### Ausschalten, bevor die Infusion beendet ist:

1. Die **+**-Taste gedrückt halten, bis Sie einen Signalton hören – dann loslassen. Im Display erscheint **STOP**.
2. Die **-**-Taste drücken, um den Signalton zu beenden.
3. Den s.c. Katheter ziehen und den Infusionsschlauch abnehmen.
4. Gleichzeitig die **d/p**- und die **-**-Taste gedrückt halten, bis im Display **END** erscheint, die Spritze auf der Pumpe lassen, während der Kolben zurückfährt – dies kann einige Minuten dauern. Warten Sie, bis im Display **OFF** erscheint, und entfernen Sie dann die Plastikspritze von der Pumpe.
5. Entsorgen Sie die Nadel des s.c. Katheters sicher.

### Ausschalten nach Ende der Infusion:

1. Den s.c. Katheter ziehen und den Infusionsschlauch abnehmen.
2. Halten Sie die **d/p**-Taste gedrückt, um den Signalton zu beenden. Der Kolben fährt in Startposition (dauert bis zu 7 Minuten) – lassen Sie die Spritze an Ort und Stelle, bis das Display **OFF** anzeigt.
3. Die Spezialspritze kann nun von der Pumpe entfernt werden.

## Hinweis

Die Spezialspritze verbleibt auf der Pumpe, bis der Kolben seine Startposition erreicht hat und im Display **OFF** erscheint. Bei einer Füllmenge von 10 ml, wie in Abb. 1 dargestellt, wird der Kolben nur die halbe Strecke zurückfahren.

## Patientenservice für Parkinson

**Zuverlässig und persönlich.** Bei Fragen rund um APO-go® unterstützt Sie unser Service-Team gerne zu Hause und in der Klinik bei der medikamentösen Einstellung.

 0800 007 82 32

  
STADAPHARM